



ABANS D'APLICAR L'ORTESIS

- Reviseu el braç per tal de detectar qualsevol canvi neurològic o vascular.
- Comproveu el dispositiu per assegurar-vos que el bloqueig està activat.



PER LA TENSIÓ DINÀMICA

- Separeu la palanca de bloqueig de seguretat.
- Desenganxeu la palanca de bloqueig flexionant lleugerament el braç.



INSPECCIONAR L'AJUST

- Comproveu l'alineació i ajusteu les corretges.
- Comproveu si hi ha canvis neurològics o vasculars.

PER APLICAR L'ORTESIS

- Descordeu o afluixeu totes les corretges.
- Feu lliscar el dispositiu al braç amb la barra articulada a la part externa de l'extremitat i la molla de tensió en línia amb l'articulació del colze.
- Alineieu l'articulació seguint els ossos llargs del braç.
- Subjecteu i apreteu les corretges (primer les corretges distals i després les corretges centrals). Les corretges han d'estar suficientment ajustades per tal que es pugui insertar un dit entre la corretja i la pell.



PER RETIRAR L'ORTESIS

- Fixeu el dispositiu en la seva posició, encaixant la palanca de seguretat amb la palanca de bloqueig.
- Deslligueu/afluixeu les corretges i feu lliscar amb cura l'ortesi fora del braç.

