



Alivio de la presión



Alivio de talón Repose[®]



El **alivio de talón Repose[®]** es un cojín con forma de cuña, desarrollado específicamente para dejar que los talones cuelguen, «suspendidos». El alivio de talón Repose[®] se coloca al pie de un colchón estático, reactivo o dinámico, preferiblemente debajo de la sábana bajera. Las pantorrillas y los tendones de Aquiles de ambas piernas tienen un ligero apoyo, mientras los dos talones cuelgan por encima del alivio de talón Repose[®]. De este modo se elimina completamente la presión en los talones. El alivio de talón Repose[®] también proporciona a los pacientes

más activos la libertad necesaria para cambiar la posición de los pies periódicamente. Incluso cuando los talones o los tobillos están sobre el alivio de talón Repose[®] con redistribución de presión, este proporciona una gran protección.

Un alivio de talón Repose[®] también se puede utilizar como almohada en pacientes sedados, para proporcionar la protección necesaria en la zona occipital o a la altura de las orejas. Se puede usar también como cuña para cuando se realizan los cambios posturales

Repose[®] Alivio de talón



Alivio de talón

Material	Membranas de aire	Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)
	Revestimiento del lado de contacto	Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072
	Inflador	ABS
Grosor del material:		50 µm
Presión máxima interna		12 mm Hg
Peso máximo		139 kg
Peso		0,18 kg
Medidas (L x An x Al)		69 x 45 x 7 cm
Peso del inflador		0,47 kg
Medidas del inflador (ø x al)		11 x 37 cm